

Gyártó:

iP3 Hungary Kft , HU-9027 Győr, Csókás u. 5.

A CE minősítést kiállító intézmény neve és címe:

iP3 Hungary Kft , HU-9027 Győr, Csókás u. 5.



HU - Használati utasítás

Termék:

Terméknév: iP3 Arcpajzs

Termékszám:

- 1010420001 (fóliázott rostéllyal)
- 1010420002

Beépülő termékek:

- Fejpánt – 1011420001
- Rostély – 0014100448
- Rostély (fóliázott) – 0014100449
- Gumiszalag – 0014100450
- Filccsik – 0014100451

A 2016/425 EU Rendelet alapvető feltételeinek és az EN166:2003 szabvány általános feltételeinek megfelelő arc és szemvédelmi termék.

FIGYELMEZTETÉS!!!

Az iP3 Arcpajzs nem nyújt korlátlan védelmet. A saját védelme érdekében olvassa végig az alábbiakat használat előtt.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Az iP3 Arcpajzsot arra tervezték, hogy védelmet nyújtson a szem és a teljes arc számára (a szemből vagy részben oldalról érkező) a cseppek és folyadék fröccsenésekkel szemben.

Az iP3 Arcpajzs CE jelölést tartalmaz a fejpánton és a rostélyon, utalva a termék védelmi tulajdonságaira.

A rostélyon és a fejpánton lévő megfelelő jelölések és jelentésük:



05 - alapanyag jelölés (csak fejpánt)



CE - CE jelölés

HASZNÁLAT:

Az iP3 Arcpajzsot arra tervezték, hogy egyéni védelmet biztosítson cseppek és fröccsenő folyadékok ellen.

Amennyiben azt a munkáltató előírja, a kockázatoknak való kitettség teljes ideje alatt viselni kell a terméket.

Ha szédülést, bőrirritációt tapasztal abba kell hagyni a termék viselését, ha az iP3 Arcpajzs bármely része megsérül, azt cserélni kell.

TÁROLÁS:

Használaton kívül ajánlott az iP3 Arcpajzsot tiszta és száraz tasakban vagy dobozban tárolni. Kérjük kerülje a kontaktot minden kemény vagy éles tárggyal, ami károsíthatja a rostélyt, vagy csökkenti a védelmi képességet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:


Hogy az iP3 Arcpajzs megfelelő állapotban maradjon, ne használjon csiszoló hatású anyagot, meleg szappanos vízzel, kis hatásfokú tisztítószerekkel, vagy fertőtlenítőszerrel tisztítsa és száraz puha ronggyal törölje.

Amennyiben a többszöri tisztítás befolyásolja a látást, a rostélyt cserélni kell.

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS:

1. A fejpánt (2) belső részére a verejtékezés felfogására és a kényelmesebb viselés biztosítására egy ragasztócsikkal ellátott filc (3) helyezhető fel. (a csomag tartalmazza)
2. A fejpánt (2) hátsó részén található beakasztó fülekre gumiszalagot (4) kell felhelyezni.
A gumiszalagon található lyukak segítségével a kívánt méretre állítható. (a csomag tartalmazza)
3. Helyezze a rostélyon (1) található lyukakat (5db lyuk) a fejpánt (2) megfelelő beakasztó füleibe (5 db fül), majd azokat lefelé húzva fixálja.
Célszerű a középső lyukkal és a hozzá tartozó füllel kezdeni, majd egyesével jobbra és balra a maradék 2-2 fülön fixálni a rostélyt.
Amennyiben a rostélyon (1) védőfólia található, óvatosan el kell távolítani.
Vigyázat! A rostély durva kezelés miatt karcolódhat! Az összeszerelés tiszta, fertőzésmentes környezetben és puha ruhakesztyűvel vagy gumikesztyűvel ajánlott.
4. Összeállítás után javasolt a termék használat előtti fertőtlenítő tisztítása.

Használati utasítás

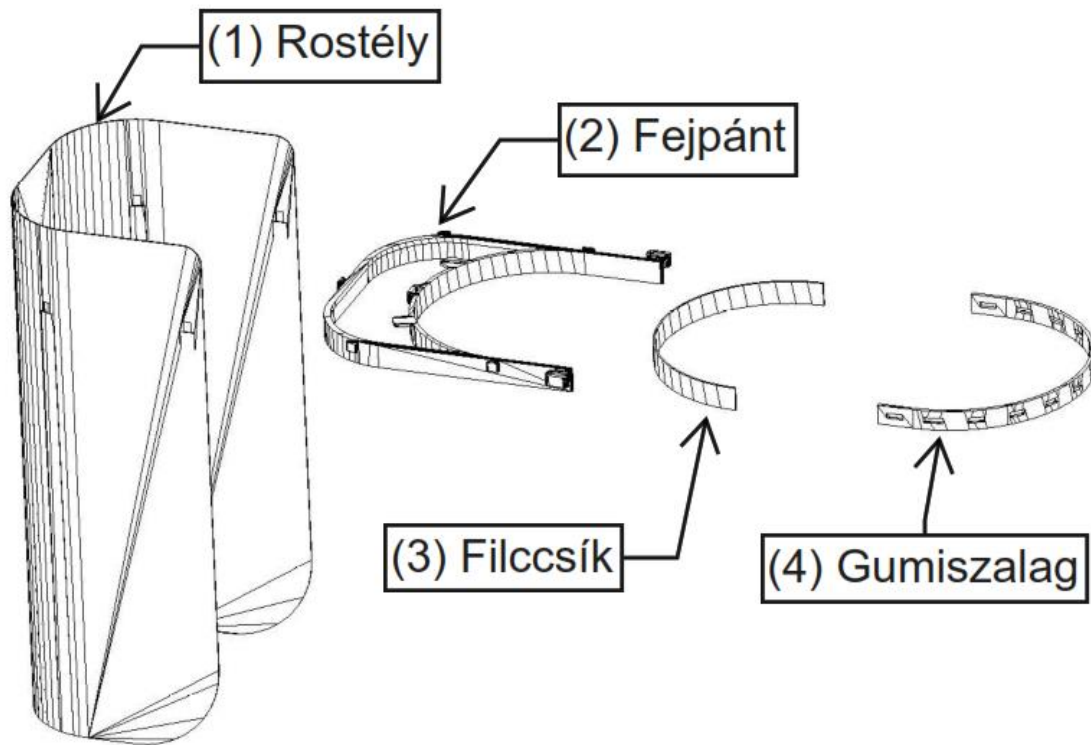

KOMPATIBILITÁS ÉS CSEREALKATRÉSZEK:

A rostély cseréje szerszám nélkül is elvégezhető, a fejpánton lévő beakasztó fülekről felfele nyomva és kifelé húzva eltávolítható a rostély.

Az IP3 Arcpajzshoz tartozó rostély és a fejpánt csak és kizárólag egymással kompatibilisek.

A rostély vagy más alkatrész cseréje / beszerzése a vevő feladata, az IP3 Hungary Kft. felé emailben (faceshield@ip3plastics.com) benyújtott igények alapján.

Rendszeresen vizsgálja meg a terméken keletkezett esetleges sérüléseket, ha szükséges cserélje.

Amikor a rostély kezd elveszíteni merevségét vagy átláthatóságát, le kell cserélni.

A rostélynak általánosan meghatározható élettartama nincsen, a kihordási ideje erősen függ a használat és tárolás körülményeitől.

Azonban a rostélyt mindenképpen le kell cserélni, ha azon lyuk(ak), törés(ek) vagy látótérbe eső karc(ok) keletkeznek, vagy ha bármilyen elváltozás a látás minőségét oly mértékben befolyásolja, amely a biztonságos munkavégzésben korlátozza, vagy eltávolíthatatlan szennyeződés rakódott rá.

FIGYELMEZTETÉS!!!

Az IP3 Arcpajzs nem nyújt védelmet mechanikai becsapódások, olvadt fémcseppek, forró részecskék, elektromos veszélyek, infravörös és ultraibolya sugárzás, fulladás, fertőzés és mérgező gázok ellen.

Amennyiben a fentiekhez tartozó védelmi szintet szeretné biztosítani, kérem megfelelő minőségű kiegészítő eszközökkel együtt (munkavédelmi szemüveg, napszemüveg stb.) használja termékünket.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 irányelve alapján:

Fejpánt – PP

Rostély – PET

Töltse le a EU megfelelőségi nyilatkozatot az: IP3 Arcpajzs - IP3 Full face shield - Facebook oldalról