



aldehidmentes készítmény, flexibilis endoszkópok, valamint az anesztéziában és az ápolásban használt orvosi eszközök és kiegészítők tisztítására és fertőtlenítésére

gigasept® AF forte

Amit nyújt

- aldehydmentes
- flexibilis és merev endoszkópokhoz is alkalmas
- alkalmazható ultrahangos tisztítókádakban rövidebb behatási idővel
- védett hatóanyag összetétel
- kellemes illat

Alkalmazási terület

Flexibilis és merev endoszkópok, sebészeti műszerek, anesztézia berendezései és légzőmaszkok tisztítása és fertőtlenítése.

Termék profil

A **gigasept® AF forte** koncentrátum hideg víz segítségével hígítható a kívánt mértékűre.

Adagolás: hatékonyság függvényében 0,75% - 5%

Példa alkalmazásra: 1 liter 5% munkoldathoz vegyen 950 ml vizet és 50 ml **gigasept® AF forte** koncentrátumot.

Közvetlenül a használatot követően merítse a tisztítandó eszközt a **gigasept® AF forte** munkoldatba. Ügyeljen arra, hogy a munkoldat a fertőtleníteni kívánt eszközt teljesen ellepje, üreges műszerek, eszközök fertőtlenítése esetén el kell kerülni a légbuborékok kialakulását. A behatási idő letelte után a műszereket, eszközöket legalább ivóvíz tisztaságú folyóvíz alatt vagy steril desztillált vízzel vagy ioncserélt vízzel öblítse le, hogy eltávolítsa a munkoldat szennyezőanyagait. Soha ne lépje túl az alkalmazott behatási időt és az előírt hígítási arányokat!

Kérjük kövesse az eszközgyártó kezelésre vonatkozó utasításait. Nemzeti előírások megkövetelhetik, hogy a tisztítás és fertőtlenítés két külön folyamatlépésben történjen.

Nem alkalmas szemkritikus és kritikus orvostechnikai eszközök végső fertőtlenítésére!

Felhasználás időtartama

A **gigasept® AF forte** bekevert munkoldat 7 napig használható, amennyiben az eszközöket előzetesen megtisztították.

Amennyiben a munkoldatot tisztításra használják, a nemzeti hatósági előírások korlátozhatják a munkoldat felhasználhatósági idejét.

Mikrobiológiai hatásspektrum

Hatásspektrum	Koncentráció	Behatási idő
Baktericid, levurocid, mikobaktericid VAH előírásnak megfelelően EN 13727, EN 14561 EN 13624, EN 14562 EN 14348, EN 14563	5% 2% 0,75%	5 perc 15 perc 30 perc
Burkos vírusok (inkl. HIV, HBV, HCV)*	1% 0,75%	5 perc 15 perc
Rotavírus** kisebbségi terhelés mellett	0,75%	5 perc
Adenovírus*	2%	60 perc
Polyoma SV40*	2%	15 perc
Ultrahangos tisztítókádakban (baktericid, levurocid, mikobaktericid, szelektív virucid inkl. HIV, HBV, HCV))	2%	5 perc

Minden megadott koncentráció magas széklet terhelés mellett.

* DVV/RKI 12/2014 irányelv szerint

** EN 14476 szerint



gigasept® AF forte

Termék adatok

Összetétel:

100 g koncentrátumra vonatkoztatva:

- 10 g dimetildioktil-ammóniumklorid,
- 15 g fenoxipropanol,
- 15,6 g alkilguanidin acetát
- 9,5 g laurilpropiléndiamine.
- Egyéb adalékok a 648/2004/EK irányelveknek megfelelően:
5 - 15% nem ionos tenzidek, illatanyagok

Kémiai / fizikai adatok	
Szín	zöld
Sűrűség	kb. 0,99 g / cm ³ / 20°C
pH érték	kb. 9,9 / 20 °C / koncentrátum
Lobbanáspont	62 °C / DIN 51755 Part 1 szerint
Megjelenés	folyadék
Viszkozitás, dinamika	kb. 60 mPa*s / 20 °C / ISO 3219 szerint

Speciális ajánlás

Mindig olvassa el a termékcímkét és terméktájékoztatót használat előtt!

Ne használja a terméket a lejáratí időt követően! Amennyiben 5% munkaoldatot használ, az oldat véletlenszerű szembe jutása irritálhatja a nyálkahártyát.

A rendkívül hatékony hatóanyag tartalom miatt az oldat homályossá (opálössz) válhat az ajánlott koncentráció mellett. Ez egy termékspecifikus tulajdonság, ami a termék hatásosságát nem befolyásolja.

A manuális fertőtlenítés mellett a **gigasept® AF forte** alkalmas félautomata mosó-fertőtlenítő berendezésekben való használatra szobahőmérsékleten.

Reakciókészség

Ne keverjük a **gigasept® AF forte**t más készítményekkel! Amennyiben a **gigasept® AF forte** kapcsolatba kerül aldehid-tartalmú munkaoldatokkal, üledékképződés és visszafordíthatatlan elszíneződés léphet fel.

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	125609
5 literes kanna	1 x 5 l	125610

Adagoló segédeszközök / Tartozékok

	Csom. egységek	Cikkszám
Adagolópumpa 5l-es kannához	1 db	117101
Kannakulcs 5l-es kannához	1 db	135810

Környezetvédelmi információ

Schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

További információ

Kérjük, látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

www.allegro.hu

Vevőszolgálat:

tel.: +36 1 350 2107

e-mail: info@allegro.hu



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

Schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



1045 Budapest,
Berlini utca 47-49.
tel.: +36 1 350 2107
fax: +36 1 329 1854
e-mail: info@allegro.hu
www.allegro.hu