

schülke →



Alacsony alkoholtartalmú
felületfertőtlenítő oldat nem-invazív
orvostechnikai eszközök és felületek gyors
fertőtlenítésére

mikroqid® universal liquid

Előnyök

- alkalmas érzékeny kommunikációs eszközök fertőtlenítésére
- dermatológiailag tesztelt
- felhasználásra kész

Felhasználási terület

A termék alkalmas orvostechnikai eszközök és egyéb, élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületek és tárgyak fertőtlenítésére. Sokoldalú gyorsfertőtlenítőnk érzékeny kommunikációs eszközök fertőtlenítésére is alkalmas.

Az okostelefonok és táblagépek a kézzel leggyakrabban érintett felületek közé tartoznak. A mikroqid® universal liquid alkalmas ezeknek a felületeknek a kezelésére az anyagok károsítása nélkül.

Alkalmazási paraméterek*

Hatásspektrum	Behatási idő mechanikai hatással (törlés)	Behatási idő mechanikai hatás nélkül (permetezés)
-baktericid hatás (<i>MRSA is</i>) -yeasticid hatás -norovirus, rotavirus és burkos virus inaktiváló hatás (<i>SARS CoV-2 is</i>) -Polyoma SV40 inaktiváló hatás	1 perc	5 perc
-mikobaktericid/ tuberkulocid hatás	5 perc	5 perc

*NNGYK engedély alapján

Alkalmazási mennyiség: kb. 40 ml/m²
Alkalmazási hőmérséklet: környezeti (~20 °C)

Tanúsítványok

- VAH tanúsítvány
- IHO lista



CE 0297



mikrozid® universal liquid

Termék adatok

100g oldat aktív hatóanyag tartalma: 17,4g propán-2-ol,
11,726 g etanol
Címkézés a 648/2004 sz. EU Rendelet szerint: <5% felületaktív
anyagok

Kémiai-fizikai adatok

Szín	színtelen
Sűrűség	ca. 0,95 g/cm ³
Lobbanáspont	26 °C / módszer: DIN 51755 rész 1
Állag	folyadék
pH	3-3,6
Viszkózitás, dinamika	nincs meghatározva

Speciális ajánlás

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

A termék nagyon jó anyagkompatibilitással rendelkezik fémekkel és műanyagokkal. Tartsa távol hőtől és hőforrástól!

További információ kérésre elérhető. A felbontott tartály eltarthatósági ideje a csomagoláson található.

Használati útmutató

A felületek előzetes tisztítása szükséges! A fertőtlenítendő felület tiszta és szennyeződésmentes legyen. Permetezze a tömény, hígíthatatlan terméket közvetlenül a fertőtlenítendő felületre vagy permetezzen egy száraz törülközőre a termékből és vigye fel a fertőtlenítendő felületre úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd a megfelelő hatáshoz **szükséges behatási idő** letelte után hagyja megszáradni vagy törölje szárazra. A behatási idő alatt a felületet nedves állapotban kell tartani. **Kizárólag professzionális használatra!** A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

Nem alkalmas félkritikus és kritikus orvostechnikai eszközök végső fertőtlenítésére! A termék kesztyű nélkül is használható, amennyiben ezt a fertőzésmegelőzés és a munkavédelem lehetővé teszi.

Rendelési információ

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
mikrozid® universal liquid 1 l szórófejes flakon (RFL)	10/karton	70000998
mikrozid® universal liquid 1l flakon (WSP)	10/karton	70003233
mikrozid® universal liquid 5 l	1/kanna	70000997

Kiegészítők

Kiegészítők alkalmazáshoz	Cikkszám
Kannakulcs 5 + 10 l kannához	135810
Dekanter tölcser	117901
FOAM szórófej DIN 32	180123
Csap 5 l / 10 l kannához	135502

Kapcsolódó termékek

- mikrozid® AF liquid
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal wipes *green line*

Környezetvédelmi információ

schülke gazdaságosan és fejlett, biztonságos és környezetbarát gyártási eljárásokkal gyártja a termékeket, miközben betartja magas minőségi szabványainkat.

További információ

Kérjük, hogy látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

www.allegrokft.hu

Vevőszolgálat:

tel.: +36 1 350 2107

e-mail: info@allegrokft.hu



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40-52100-0
Fax +49 40-52100-318
www.schuelke.com info@schuelke.com