



Non-invazív orvostechnikai eszközök és felületek gyors, alkoholalapú fertőtlenítése és tisztítása

mikroqid® AF wipes

Előnyök

- széles hatásspektrum nagyon rövid behatási idő alatt
- maradványmentes száradás
- felhasználásra kész

Alkalmazási terület

A termék alkalmas orvostechnikai eszközök és egyéb, élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező alkoholálló felületek és tárgyak felületeinek egy fázisban történő fertőtlenítésére és tisztítására.

Klasszikus termékünk a gyors felületfertőtlenítők közül alkalmas olyan betegközeli, fertőzésveszélynek fokozottan kitett felületek fertőtlenítésére, ahol követelmény a rövid behatási idő.

Mikrobiológiai hatásspektrum

Mikroorganizmusok	Behatási idők
Baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid/mikobaktericid, szelektív virucid (adeno-, noro-, rota- és burkos vírusok)	1 perc
Fungicid	2 perc
Polyoma SV 40	5 perc

A mikroqid® AF wipes

- baktericid (MRSA, TBC is),
- fungicid,
- szelektív virucid (HBV, HCV, HIV, adeno-, noro-, rota-, polyomavírus inaktiváló) hatással rendelkezik.



CE 0297



Termék adatok

Összetétel:

100 g oldat hatóanyag tartalma:
23,265 g etanol, 35 g 1-propanol

Kémiai / fizikai adatok

Szín	színtelen
Sűrűség	kb. 0,89 g/cm ³ / 20 °C /aktív oldatra vonatkozóan
Lobbanáspont	27 °C / DIN 51755 / 1 szerint /aktív oldatra vonatkozóan
Megjelenés	vizes, alkoholtartalmú oldat nem-szótt anyagon
pH	nem alkalmazható
Viszkózitás, dinamika	nincs meghatározva

Speciális ajánlás

Biztonságosan használja a fertőtlenítőszereket! Mindig olvassa el a termékcímkét és terméktájékoztatót használat előtt!

A termék jó anyagkompatibilitással rendelkezik fémekkel és műanyagokkal (kivéve akril üveggel és alkohol érzékeny festékekkel). Az alkoholra különösen érzékenyek felszíneket – mint pl. az akril üveg – nem szabad a termékkel kezelni. Kérjük kövesse a tűzvédelmi előírásokat, amikor alkohol tartalmú fertőtlenítőszert alkalmaz! Tartsa hőtől és hőforrástól távol. Védőkesztyű viselése ajánlott. További információ kérésre elérhető. A megfelelő kezelés esetén schülke garatálja a termék 3 hónapos felhasználhatóságát a felnyitást követően. Kizárólag professzionális felhasználásra. A termékkel kapcsolatban fellépő súlyos eseteket jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hivatalnak. Nem alkalmas szemkritikus és kritikus orvosi eszközök végső fertőtlenítésére.

Használati útmutató

Törölje át a termékkel a fertőtlenítendő felületet/tárgyat úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd a megfelelő hatáshoz szükséges **behatási idő** letelte után hagyja megszáradni vagy törölje szárazra. A behatási idő alatt a felületet nedves állapotban kell tartani. Használat után a fedelet szorosan zárja vissza. Csak kis területeket kezeljen. A letörölhető felület nagysága függ a szoba hőmérsékletétől és a fertőtlenítendő felület struktúrájától. Biztosítsa a higiénés követelmények betartását a felnyitáskor és az első kendő befűzésekor.

Doboz utántöltése

Először fertőtlenítse a kezét és vegyen fel új védőkesztyűt és egy köpenyt. Figyeljen arra, hogy utántöltés közben a kesztyűk ne szennyeződjenek valamilyen más tevékenység miatt! Helyezze át a lejárati dátummal ellátott matricát az adagoló dobozra. Csavarja le a doboz tetejét, helyezze az utántöltő tasakot teljesen az adagoló dobozba (ha szükséges, formázza előre úgy, hogy illeszkedjen) és vágja le a csomag végét. Húzza ki a kendőt a tekercs közepéről, húzza át alulról a fedél nyílásán. Fertőtlenítse a fedelet és csavarja a helyére. Magas kockázatú területeken schülke nem javasolja az utántöltő tasakok használatát.

Rendelési információ

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
150 db-os doboz	10 doboz/karton	109179
150 db-os utántöltő tasak	20 tasak/karton	109205
Jumbo 200 db-os doboz 220 db-os doboz	10 doboz/karton	109157
Jumbo 200 db-os utántöltő tasak 220 db-os utántöltő tasak	10 tasak/karton	109159 70001405

Adagoló segédeszköz / tartozékok

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
Falra szerelhető fém doboztartó	1 db	134417

Környezetvédelmi információ

schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

További információ

Kérjük, látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

www.allegrokft.hu

Vevőszolgálat:

tel.: +36 1 350 2107

e-mail: info@allegrokft.hu



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



1045 Budapest,
Berlini utca 47-49.
tel.: +36 1 350 2107
fax: +36 1 329 1854
[e-mail: info@allegrokft.hu](mailto:info@allegrokft.hu)
www.allegrokft.hu