

schülke -t



a gigasept® instru AF aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítőszer orvosi műszerekhez

gigasept® instru AF

Amit nyújt

- aldehydmentes
- kellemes enyhe illat
- nagyon jó tisztító hatás
- széles mikrobiológiai hatásspektrum
- rövidebb behatási idő ultrahangos berendezésekben

Alkalmazási terület

Alkalmas mindenféle hőálló és hőérzékeny műszer (kivéve flexibilis endoszkópok) kézi tisztítására és fertőtlenítésére.

Széles mikrobiológiai hatásspektrumának és kitűnő tisztítási tulajdonságának köszönhetően – különösen ultrahangos kádakban – a **gigasept® instru AF** rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely megfelel az orvostechikai eszközök tisztításával és fertőtlenítésével szemben állított követelményeknek a betegellátásban.

Alkalmazás módja

A **gigasept® instru AF** koncentrátum, mely hideg vízzel hígítható a kívánt alkalmazási koncentrációra.

Adagolási / alkalmazási példa:

hatásosság függvényében, 1,5% - 4%. 1 liter 3%-os munkaooldathoz 970 ml vízhez adjon 30 ml **gigasept® instru AF**-et.

A tisztításra szánt eszközöket helyezze a **gigasept® instru AF** munkaooldatba közvetlenül a használat után úgy, hogy a teljes felszínüket ellepje, az üregeket is, és hagyja hatni.

A fertőtlenítést követően alaposan öblítse le az eszközöket legalább ivóvíz tisztaságú vízzel, vagy ha lehet, steril desztillált vízzel vagy teljesen ionmentes vízzel és távolítsa el minden fertőtlenítőszer maradványt. Kérjük, kövesse az eszkögyártó tisztításra vonatkozó utasításait.

Nemzeti előírások megkövetelhetik, hogy a tisztítás és fertőtlenítés két fázisban történjen.

Nem alkalmas szemkritikus és kritikus orvosi eszközök végső fertőtlenítésére!

Mikrobiológiai hatásspektrum:

Hatásspektrum	Koncentráció	Behatási idő
Baktericid, levurocid, mikobaktericid VAH előírásnak megfelelően	3 %	15 perc
EN 13727, EN 14561	2 %	30 perc
EN 13624, EN 14562	1,5 %	60 perc
EN 14348, EN 14563		
Ultrahangos mosóban (baktericid, levurocid, tuberkulocid)	3 %	5 perc
Burkos vírusok (inkl. HIV, HBV, HCV) DVV-/RKI 12/2014 irányelv szerint	1 %	5 perc
Rotavírus terhelés nélkül DVV/RKI alapján	0,5 %	5 perc
Adenovírus DVV-/RKI 12/2014 irányelv szerint	4 %	60 perc
Polyoma SV40 DVV-/RKI 12/2014 irányelv szerint	4 %	60 perc

Minden megadott adat magas szérumszám mellett értendő.

CE 0297

Termékadatok

Összetétel:

100 g koncentrátum az alábbi aktív hatóanyagokat tartalmazza:

- 15,6 g kókusz-propilén-diamin-guanidin-diacetát,
- 35 g fenoxipropanol,
- 2,5 g benzalkónium-klorid.
- Egyéb összetevők a 648/2004/EK irányelveknek megfelelően:
5-15% nem ionos tenzidek, illatanyagok
N-dodecilpropán-1.3-diamint tartalmaz

Kémiai / fizikai adatok

Szín	zöld
Sűrűség	kb. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Lobbanáspont	36 °C / DIN 51755 Part 1 szerint
Megjelenés	folyadék
pH érték	kb. 9 / 20 °C / koncentrátum
Viszkózitás, dinamika	kb. 30 mPa*s / 20 °C / DIN 54453 szerint

Speciális ajánlás

Mindig olvassa el a címke- és termékinformációt a használatot megelőzően!

Mind a **gigasept® instru AF** koncentrátum, mind az elkészített munkaoldat reakcióba léphet aldehid bázisú szerekkel és egyéb tisztítószerekkel, ami kedvezőtlen hatásokhoz vezethet (üledékképződés, elszíneződés, hatékonyság elvesztése). Ne keverje más termékekkel!

Ezért a **gigasept® instru AF** első alkalommal történő alkalmazása előtt ajánljuk a fertőtlenítőkádak és egyéb alkalmazási segédeszközök vízzel történő alapos elmosását.

Ne használja a **gigasept® instru AF**-et lejáratú időt követően!

Munkaoldat felhasználhatósága

A **gigasept® instru AF** munkaoldat 7 napig használható akkor, ha kizárólag előzetesen megtisztított eszközök fertőtlenítésére használják. Amennyiben a munkaoldatot tisztításra használják, a nemzeti előírások korlátozhatják azt az időtartamot, ameddig a munkaoldat felhasználható.

Ultrahangos tisztítókádban történő alkalmazása

A **gigasept® instru AF** kifejezetten alkalmas ultrahangos tisztítókádakban történő alkalmazáshoz. Az oldat kémiai stabilitása fenntartott a folyamat során. Tanulmányok igazolják, hogy kitűnő tisztítóhatás érhető el a **gigasept® instru AF** alkalmazásával már néhány másodperces behatási idő után. (Ezen tanulmányokat külön kérésre eljuttatjuk Önhez.) Ügyelni kell arra, hogy a munkaoldat soha ne melegedjen 40°C fölé!

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2l	107425
5 literes kanna	1 x 5l	107426

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
Adagolópumpa 5l-es kannához	117101
Kannakulcs 5l-es kannához	135810

Környezetvédelmi információk

Schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

További információ

Kérjük, látogassa meg honlapunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

www.allegro.hu

Vevőszolgálat:

tel: +36 1 350 2107

e-mail: info@allegro.hu